



# ООО "MICRONUTRIENTS"

Systemic diagnostics and treatment of mineral imbalances and intoxications

DR. SKALNY'S HAIR ANALYSES®

Licenses: 77-01-006064

Perevedenovsky per., dom 13, str.8  
105082, Moscow, Russia

Tel.: (495) 641-0391, 641-0392, 641-0393  
www.microelements.ru, e-mail: skalny2@microelements.ru

## 毛髮採樣說明

1. 從髮根部位剪起
2. 於後腦勺靠近頸部之位置，挑選 4-5 個採樣點
3. 每份採樣點，從髮根起算，需 3-5 公分(無需保留髮尾)
4. 一位病人剪取頭髮之總量，需達 2-3mm 厚度之一撮頭髮 (重量約 200 毫克)
5. 若為短髮，採樣總量需達一茶匙的面積 (滿)
6. 採樣件之髮根方向須一致
7. 剪刀每次使用前後應以酒精消毒
8. 須準備髮夾
9. 請使用無粉之醫用手套 (如尼龍材質)

- 請將髮根朝向信封底部，並請於信封上標註髮根方向
- 請勿將毛發放入鋁箔紙或塑膠袋裡
- 毛髮保存: 無特殊保存條件
- 頭髮最好必須乾淨: 無髮膠 / 髮雕 / 髮露等造型用品 (須提醒客戶)

