



台灣安麗莎醫療器材

科技股份有限公司

安麗莎守護天使 中央監控系統

日期
姓名
職稱

安麗莎守護天使 GA1000/1001 Lite

- 安麗莎生理訊號監控系統 GA1000系列 透過穿戴設計和藍牙無線傳輸技術，每秒不間斷連續檢測病患的血氧濃度(SpO2)和脈搏(PR)。同時配備了可依個人需求調整之警報系統，當生訊超過預設區間時會即發出警報。
- GA1000系列有可依使用族群區分嬰兒、兒童或成人用。血氧感測器內建充電式鋰電池，供重複充電使用。顯示裝置和血氧感測器之間的距離必須在10公尺內，以確保藍芽連線正常運作。
- 體溫模組可每秒不間斷連續檢測體溫；將主機固定於貼片後，貼附於腋下，即可開始檢測。使用鈕扣電池，更換方便，一般便利商店即可購得，可持續不斷使用達168小時。適合所有年齡層使用，監測時與被照護不需直接接觸，避免造成被感染之風險。

成人及兒童用 GA1000 LITE

嬰兒用 GA1000 LITE

體溫模組



感測模組

穿戴示意圖



感測模組



穿戴示意圖



感測模組



穿戴示意圖

安麗莎守護天使 Gateway

安麗莎守護天使Gateway 可將感測模組之藍芽訊號，轉換成無線或有線網路訊號，再將生訊以網路訊號上傳至所需位置，如雲端或地端伺服器等，同時將接收之生理訊號顯示於螢幕中。



若有移動之需求，可搭配一對二之傳輸線，外加行動電源，使移動中生理訊號不間斷。



安麗莎生理監控平台		Aulisa Physiological Monitoring Platform		請輸入關鍵字搜尋...		搜尋		選擇排序		血氣與心律監測		登出		3 警報人數		5 監控人數			
姓名	床號	血氧	心律	溫度	姓名	床號	血氧	心律	溫度	姓名	床號	血氧	心律	溫度	姓名	床號	血氧	心律	溫度
程○蘭	G001	92%	23	36.3	楊○涵	A002	82%	25	35.7	江○英	G004	100%	125	35.2	沈○	B003	92%	123	35
<input type="checkbox"/> 重點觀察					<input type="checkbox"/> 重點觀察					<input type="checkbox"/> 重點觀察					<input type="checkbox"/> 重點觀察				
2022/03/27 09:15:25					2022/03/27 09:15:25					2022/03/27 09:15:25					2022/03/27 09:15:25				
狀態: 脈搏過低					狀態: 脈搏過低、血氧濃度過低					狀態: 血氧濃度過高					狀態:				
附註: 隨機產生資料					附註: 隨機產生資料					附註: 隨機產生資料					附註: 隨機產生資料				
檢視					檢視					檢視					檢視				
編輯					編輯					編輯					編輯				

安麗莎守護天使 中央監控系統

安麗莎守護天使中央監控系統為多人照護使用，硬體數量可依實際需求購買，無人數限制。使用單位可於購買之硬體數量內，依不同地點自行分配其中央監控之數量，亦可分配每個中央監控之監控人數，達到最適當之使用方式。其生訊數據標準版儲存於本公司提供之雲端伺服器，若使用單位有其他需求，如將資料改儲存於醫院地端伺服器，或修改使用客製化介面等，均可配合修改之客製化要求。



- 安麗莎生理監控平台為中央監控系統之後端顯示網頁頁面，係由所提供客戶帳號登錄後方可使用

管理者帳號



- 透過不同層級帳號登入，進入不同頁面，以方便帳號管理。

非管理者帳號

排序	醫師姓名	帳號名稱	Email	單位名稱	電話號碼	Gateway	Gateway	個人資料	刪除帳號
1	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
2	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
3	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
4	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
5	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
6	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
7	陳聰明	Andy Chen	andy.chen.aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除

姓名	床號	血壓	心律	溫度
程○蘭	G001	92%	23	36.3
楊○通	A002	82%	25	35.7
江○英	G004	100%	125	35.2
沈○	B003	92%	123	35
李○杰	A005	---	---	---



安麗莎守護天使 生理監控平台 帳號管理頁面

- 帳號管理可依實際需求自行搭配，分配不同群組與顯示數量

1.於表格下方，顯示目前可檢視的Gateway序號

2.設定此使用者可檢視的Gateway序號

3.編輯修改此使用者資料

4.刪除使用者



安麗莎生理監控平台
Aulisa Physiological Monitoring Platform

請輸入關鍵字搜尋...

搜尋

選擇排序↑

5+

新增帳號



修改資料



登出

7

帳號人數

排序	醫師姓名	帳號名稱	Email	單位名稱	電話號碼	Gateway	Gateway	個人資料	刪除帳號
1	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	1 檢視	2 設定	3 修改	4 刪除
目前已設定的Gateway: 000001、000005、000015、000013、000025									
2	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
3	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
4	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
5	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
6	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除
7	陳曉明	Andy Chen	andy.chen aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231	檢視	設定	修改	刪除

5.新增底下帳號

© 2021 TAIWAN Aulisa Medical DEVICES TECHNOLOGIES INC. – All rights reserved

- 新增帳號管理，簡單清楚

醫師姓名	帳號名稱	Email	單位名稱	電話號碼
陳曉明	Andy Chen	andy.chen@aulisa.com	心臟科	02-2655-7297 #231



基本資料輸入後呈現方式

+ 新增帳號資料 (代表必填欄位，並請填寫真實資料)

醫師姓名 *	<input type="text" value="請輸入真實姓名"/>	帳號名稱 *	<input type="text" value="請輸入英文數字共8-16位數字"/>
Email *	<input type="text" value="請輸入真實Email"/>	密碼 *	<input type="text" value="英文數字共8-16位數字"/>
單位名稱 *	<input type="text"/>	再次確認密碼 *	<input type="text" value="英文數字共8-16位數字"/>
電話號碼 *	<input type="text"/>		

@ntuh.gov.tw

依客戶需求建立主帳號

備註

Gateway設定 (請勾選您要設定的裝置)

- | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 000001 | <input type="checkbox"/> 000006 | <input type="checkbox"/> 000011 | <input type="checkbox"/> 000016 | <input type="checkbox"/> 000021 | <input type="checkbox"/> 000026 |
| <input type="checkbox"/> 000002 | <input type="checkbox"/> 000007 | <input type="checkbox"/> 000012 | <input type="checkbox"/> 000017 | <input type="checkbox"/> 000022 | <input type="checkbox"/> 000027 |
| <input type="checkbox"/> 000003 | <input type="checkbox"/> 000008 | <input type="checkbox"/> 000013 | <input type="checkbox"/> 000018 | <input type="checkbox"/> 000023 | <input type="checkbox"/> 000028 |
| <input type="checkbox"/> 000004 | <input type="checkbox"/> 000009 | <input type="checkbox"/> 000014 | <input type="checkbox"/> 000019 | <input type="checkbox"/> 000024 | <input type="checkbox"/> 000029 |
| <input type="checkbox"/> 000005 | <input type="checkbox"/> 000010 | <input type="checkbox"/> 000015 | <input type="checkbox"/> 000020 | <input type="checkbox"/> 000025 | <input type="checkbox"/> 000030 |

顯示所有主帳號底下Gateway序號，指派Gateway檢視權限給底下使用者帳號檢視Gateway

確定送出

取消回列表頁

- 依實際需求分配需檢視之Gateway。

顯示所有主帳號底下Gateway序號，指派Gateway檢視權限給底下使用者帳號檢視Gateway



安麗莎生理監控平台
Aulisa Physiological Monitoring Platform

帳號管理 修改資料 登出 7 帳號人數

Gateway設定 (請勾選您要設定的裝置)

<input type="checkbox"/> 000001	<input type="checkbox"/> 000006	<input type="checkbox"/> 000011	<input type="checkbox"/> 000016	<input type="checkbox"/> 000021	<input type="checkbox"/> 000026
<input type="checkbox"/> 000002	<input type="checkbox"/> 000007	<input type="checkbox"/> 000012	<input type="checkbox"/> 000017	<input type="checkbox"/> 000022	<input type="checkbox"/> 000027
<input type="checkbox"/> 000003	<input type="checkbox"/> 000008	<input type="checkbox"/> 000013	<input type="checkbox"/> 000018	<input type="checkbox"/> 000023	<input type="checkbox"/> 000028
<input type="checkbox"/> 000004	<input type="checkbox"/> 000009	<input type="checkbox"/> 000014	<input type="checkbox"/> 000019	<input type="checkbox"/> 000024	<input type="checkbox"/> 000029
<input type="checkbox"/> 000005	<input type="checkbox"/> 000010	<input type="checkbox"/> 000015	<input type="checkbox"/> 000020	<input type="checkbox"/> 000025	<input type="checkbox"/> 000030

確定送出 取消回列表頁

© 2021 TAIWAN Aulisa Medical DEVICES TECHNOLOGIES INC. – All rights reserved

- 顯示介面清楚易懂

警報發生時顯示紅色按鈕並會有跳動動畫，點選可進入個人檢視頁面(紅/灰按鈕皆可按)

勾選時此病患會置頂



安麗莎生理監控平台
Aulisa Physiological Monitoring Platform

請輸入關鍵字搜尋... **搜尋** 選擇排序↑

血氧與心律監測 登出 **3** 警報人數 **5** 監控人數

搜尋及排序功能

姓名	床號	血氧	心律	溫度	重點觀察	檢視	編輯
程○蘭	G001	92%	23	36.3	<input type="checkbox"/>	紅	灰
楊○涵	A002	82%	25	35.7	<input type="checkbox"/>	紅	灰
江○英	G004	100%	125	35.2	<input type="checkbox"/>	紅	灰
沈○	B003	92%	123	35	<input type="checkbox"/>	灰	灰
李○杰	A005	---	---	---	<input type="checkbox"/>	灰	灰

2022/03/27 09:15:25
狀態：脈搏過低
附註：隨機產生資料

2022/03/27 09:15:25
狀態：脈搏過低、血氧濃度過低
附註：隨機產生資料

2022/03/27 09:15:25
狀態：血氧濃度過高
附註：隨機產生資料

2022/03/27 09:15:25
狀態：
附註：隨機產生資料

2022/03/27 09:15:25
未偵測
附註：隨機產生資料

編輯此病患的資訊，可編輯姓名、床號、附註

© 2021 TAIWAN Aulisa Medical DEVICES TECHNOLOGIES INC. - All rights reserved

編輯個人資料

姓名 * 楊子涵

床號 * A002

附註 * 隨機產生資料

存檔關閉 取消

- 可展開觀看個人細部資料



安麗莎生理監控平台
Aulisa Physiological Monitoring Platform

 血氧與心律監測

 登出

姓名	床號	血氧	心律	溫度	狀態: 頭痛
陳曉明	0008	93%	39	36	附註: 隨機產生資料

匯出Excel

匯出CSV


生理量測趨勢圖

日期區間

起始日

結束日

查詢

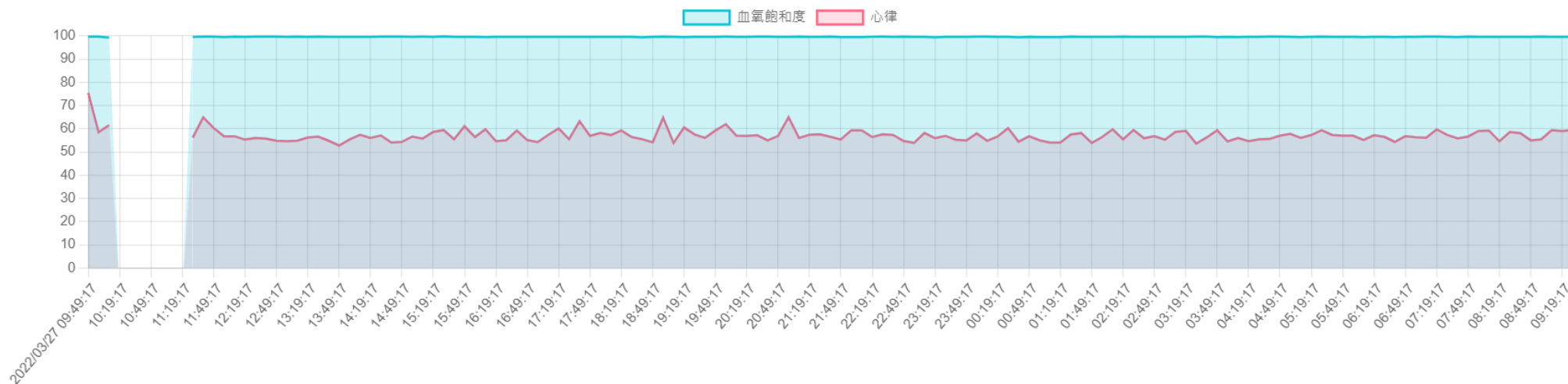



Thank You 感謝您。

-  姓名
-  電話
-  email
-  www.aulisa.com