



備註

- 每次使用前請先清潔血氧探頭。
- 長按電源鍵3秒可關機，短按電源鍵可關閉顯示螢幕。

警報系統

在高度警報情況下，血氧主機畫面顯示紅底白字做為提醒，中度警報情況下，畫面頂端的符號以變色提醒。更多警報資訊請參閱“安麗莎”生理訊號監控系統之系統介面簡易使用指南。

Guardian Angel Rx Guardian Angel Rx Lite

“安麗莎”血氧模組

GA-OM0007 / GA-OM0008
簡易使用指南



製造業者名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司
製造業者地址：臺北市南港區重陽路218之2號
醫療器材商名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司
醫療器材商地址：臺北市南港區園區街3之1號6樓之2
www.aulisa.com.tw



如需客戶服務請撥打免費付費客服專線：
0809-083-100


「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規範。」
本簡易使用指南僅供參考，完整的產品資訊、規格、警語和注意事項請參閱中文說明書和原廠使用說明書。

衛部醫器製字第007660號


產品配件



血氧主機

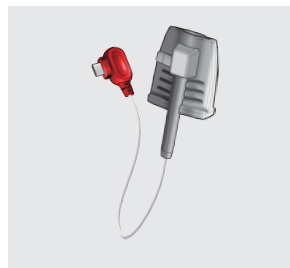

成人重複用血氧探頭

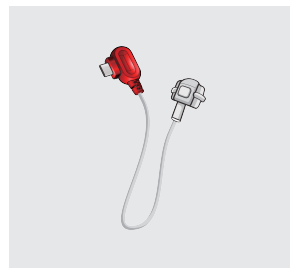

兒童重複用血氧探頭



綁帶



充電器

產品介紹




- 1 電源開關鍵
- 2 血氧主機
- 3 充電器插孔/探頭插孔
- 4 脈搏(次/分)
- 5 血氧濃度(%)
- 6 藍牙連線狀態
- 7 指套穿戴狀態
- 8 主機電量
- 9 脈搏強度



產品操作


- 1 使用血氧模組前請先將主機充飽電 (約需60分鐘)，將充電器的Type-C端插入充電器插孔進行充電。
- 2 本產品需搭配“安麗莎”生理訊號監控系統使用，請參閱“安麗莎”生理訊號監控系統之系統介面簡易使用指南進行系統配對及連線。

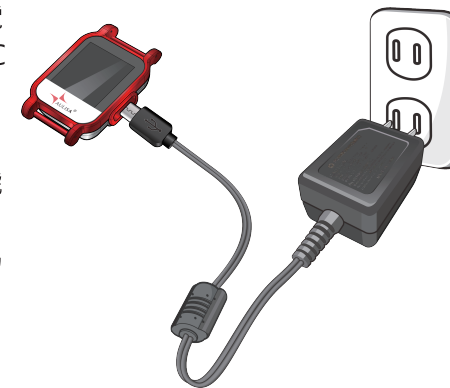


- 3 根據下列步驟穿戴血氧模組。




- 1 將綁帶(毛面朝上)穿入支架孔內。

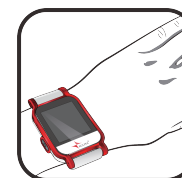

- 2 將主機穿戴於手腕上。

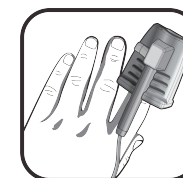


- 3 將指套套上手指。(成人)

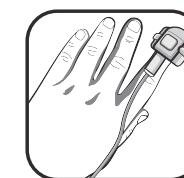


- 將指套套上手指。(兒童)



- 4 將探頭插上主機。

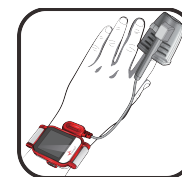

- 5 穿戴完成! 按下電源鍵開機。(成人)

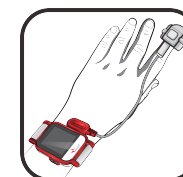

- 穿戴完成! 按下電源鍵開機。(兒童)